

## MODE D'ENVOI DES PRÉLÈVEMENTS HISTOLOGIQUES AU LAPVSO



- Afin de respecter les **normes de transport ADR2013/P650 (transport aérien)**, le LAPVSO vous propose **des kits payants pour un envoi sécurisé et rapide** de vos prélèvements **A commander sur [www.lapvso.com](http://www.lapvso.com) à l'onglet « Commander » puis « Commander un kit » puis choisir « Kit Outre-Mer ».**

### Votre envoi doit comporter

- ① **1 flacon de formol** contenant votre prélèvement parmi 3 contenances
  - 60 ml pour les envois courants
  - 25 ml pour les biopsies
  - 180 ml pour les pièces anatomiques volumineuses
- ② **1 sachet étanche à usage unique résistant à la pression 95kPa\*** à double poche
  - poche *prélèvement centrale* contenant un tampon absorbant
  - poche *document extérieure*
- **1 boîte postale en carton**
- **1 formulaire de demande d'analyse** à télécharger sur [www.lapvso.com](http://www.lapvso.com)

### Comment procéder

- ③ Placer chaque flacon, identifié par les noms de l'animal & du propriétaire, dans la *poche centrale* d'un sachet étanche à usage unique\* avec le tampon absorbant. Fermer la poche par sa partie adhésive
- ④ Placer formulaire de demande d'analyse et paiement dans la *poche document extérieure* du même sachet étanche
- ⑤ Enfermer le sachet étanche dans la boîte postale en carton
- ⑥ Acheminer la boîte postale en carton au laboratoire via le transporteur de votre choix.

\* Au maximum par sachet étanche  
1 x 180 ml ou 2 x 60 ml ou 6 x 25 ml

Toute l'équipe du LAPVSO  
vous remercie