



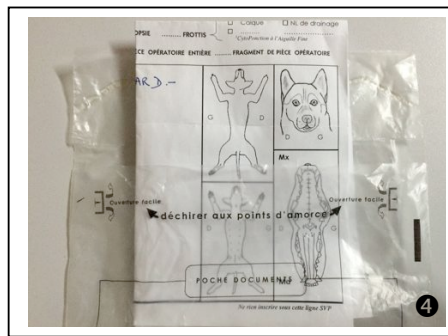

## MODE D'ENVOI DES PRÉLÈVEMENTS HISTOLOGIQUES AU LAPVSO

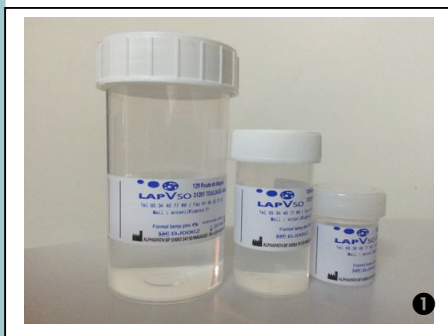

- Afin de respecter les **normes de transport ADR2013/P650**, le LAPVSO met à votre disposition **des kits** pour **un envoi sécurisé** de vos prélèvements **A commander sur [www.lapvso.com](http://www.lapvso.com)** à l'onglet « **Commander** » puis « **Commander un kit** »

### Votre envoi doit comporter

- **① 1 flacon de formol** contenant votre prélèvement parmi 3 contenances
  - 60 ml pour les envois courants
  - 25 ml pour les biopsies
  - 180 ml pour les pièces anatomiques volumineuses
- **② 1 sachet étanche à usage unique\*** à double poche
  - poche prélèvement centrale contenant un tampon absorbant
  - poche document extérieure
- **1 boîte postale en carton**
- **1 étiquette adhésive UN 3373**
- **1 formulaire de demande d'analyse à télécharger sur [www.lapvso.com](http://www.lapvso.com)**

### Comment procéder

- **③** Placer chaque flacon, identifié par les noms de l'animal & du propriétaire, dans la *poche centrale* d'un sachet étanche à usage unique\* avec le tampon absorbant. Fermer la poche par sa partie adhésive
- **④** Placer formulaire de demande d'analyse et paiement dans la *poche document extérieure* du même sachet étanche
- **⑤** Enfermer le sachet étanche dans la boîte postale en carton
- **⑥** Enfermer la boîte postale dans la pochette Chronopost
- **Editer une étiquette Chronopost adressée au LAPVSO sur [www.lapvso.com](http://www.lapvso.com)** à l'onglet « **Commander** » puis « **Editer une étiquette Chronopost** »
- Coller sur la pochette Chronopost, l'étiquette e-Chronopass éditée et l'étiquette UN3373 fournie

\* Au maximum par sachet étanche  
1 x 180 ml ou 2 x 60 ml ou 6 x 25 ml

Toute l'équipe du LAPVSO  
vous remercie