



# Laboratoire d'Anatomie Pathologique Vétérinaire du Sud-Ouest

11 Bis, Allée des Vitarelles, 31100 TOULOUSE

☎ 05.34.40.77.88

✉ Mail : [accueil@lapvso.fr](mailto:accueil@lapvso.fr)



## MODE D'ENVOI DES PRÉLÈVEMENTS HISTOLOGIQUES AU LAPVSO



- Afin de respecter les **normes de transport ADR2013/P650**, le LAPVSO met à votre disposition un **kit Standard pour un envoi sécurisé** de vos prélèvements A commander sur [www.lapvso.com](http://www.lapvso.com) à l'onglet « Commander » puis « Commander un kit »

### Votre envoi doit comporter

- **① 1 flacon de formol** contenant votre prélèvement parmi 3 contenances
  - 60 ml pour les envois courants
  - 25 ml pour les biopsies
  - 180 ml pour les pièces anatomiques volumineuses
- **② 1 sachet étanche à usage unique** à double poche
  - poche prélèvement, centrale contenant un tampon absorbant
  - poche document, extérieure
- **1 boîte postale en carton**
- **1 étiquette adhésive UN 3373**
- **1 formulaire de demande d'analyse** à télécharger sur [www.lapvso.com](http://www.lapvso.com)

### Comment procéder

- **③** Placer chaque flacon, identifié par les noms de l'animal & du propriétaire, dans la *poche centrale* d'un sachet étanche à usage unique avec le tampon absorbant. Fermer la poche par sa partie adhésive
- **④** Placer formulaire de demande d'analyse et paiement dans la *poche extérieure* du même sachet étanche
- **⑤** Enfermer le sachet étanche dans la boîte postale en carton
- **⑥** Enfermer la boîte postale dans la pochette Chronopost
- **Editer une étiquette e-chronopass pré-adressée au LAPVSO** sur [www.lapvso.com](http://www.lapvso.com) et garder la partie à conserver par l'expéditeur.
- Coller sur la pochette Chronopost, l'étiquette e-chronopass éditée et l'étiquette UN3373 fournie dans le Kit Standard.

Toute l'équipe du LAPVSO  
vous remercie